

PRUEBA RÁPIDA CASERA DE COVID-19

INSTRUCCIONES DE USO

Registro Sanitario No.
INVIMA 2022RD-0007595

INTRODUCCIÓN

IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la prueba.
 - Esta prueba puede utilizarse dentro de los primeros diez días de aparición de los síntomas de COVID-19.
 - Esta prueba puede realizarse en casa en personas de 12 a 70 años.
 - La preparación de la prueba dura unos 5 minutos. El resultado debe leerse a los 15 minutos.
 - Todos los materiales de prueba deben estar a temperatura ambiente antes de su uso.
 - Adopte las medidas de seguridad apropiadas cuando realice las pruebas a otras personas
- Si tienes alguna pregunta sobre el uso de la prueba o la lectura de los resultados, escríbenos por Whatsapp a nuestra línea de atención al cliente


Whatsapp: 3015051140

E-Mail: contacto@dmglobal.com.co

www.dmglobal.com.co

LAVADO DE MANOS

Lávate las manos con agua y jabón o utiliza un desinfectante para manos. Sécate las manos antes de empezar.

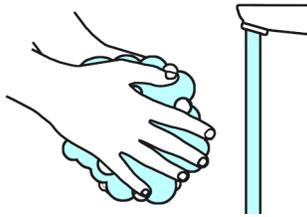

REUNIR LOS MATERIALES


Compruebe la fecha de caducidad del kit de prueba antes de utilizarlo. No comience el paso 1 hasta que esté listo para comenzar la prueba.




TUBO



TAPA GOTERO

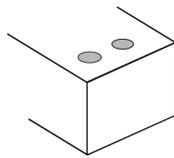

ESTACIÓN DE TRABAJO

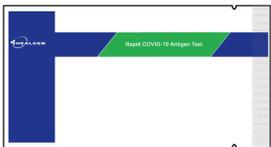

BOLSA QUE CONTIENE
DISPOSITIVO DE PRUEBA



HISOPO




RELOJ
(No incluido)

PASO 1


ABRIR EL TUBO

Retire el sello del tubo. Evite derramar el líquido.

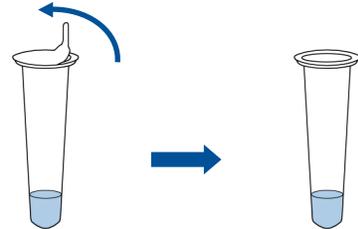

COLOCAR EL TUBO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO


Introduzca el tubo en uno de los orificios de la estación de trabajo. Asegúrese de que el tubo está en posición vertical.

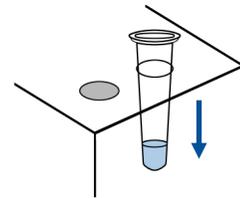

PASO 2


ABRIR EL HISOPO

Abra la bolsa de hisopos despegando la tapa. Sujete el extremo del bastoncillo de plástico del hisopo y retírelo de la bolsa. No toque el extremo del hisopo.

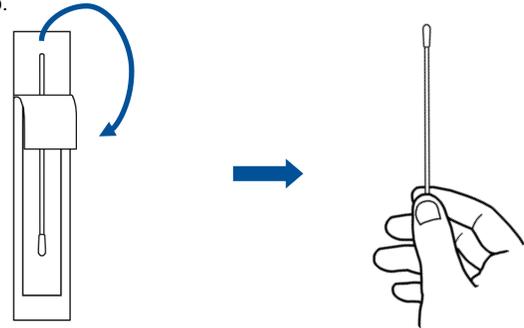

FROTAR AMBAS FOSAS NASALES

Introduzca la punta del hisopo en una fosa nasal, a unos 3/4 de pulgada de profundidad. **Frote el interior de la fosa nasal en un círculo completo al menos 5 veces.** Retire la torunda de la fosa nasal y repita la operación en la otra fosa.

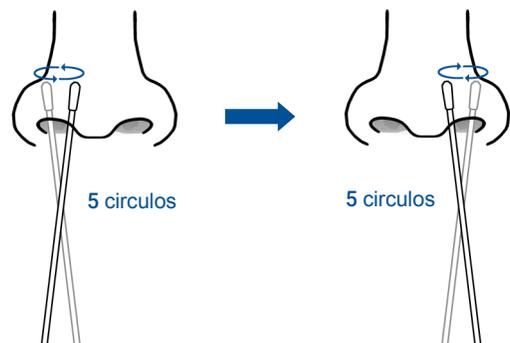

PASO 3

COLOCAR EL HISOPO EN EL TUBO


Retire el tubo de la estación de trabajo. **Introducir la punta del hisopo en la abertura del tubo.** Mezclar bien pasando la punta del hisopo al menos 6 veces por el fondo y los lados del tubo.



COLOCAR EL TUBO EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO

Vuelva a colocar el tubo en la estación de trabajo. Mantenga el hisopo dentro del tubo.


Inicie el temporizador durante 1 minuto.

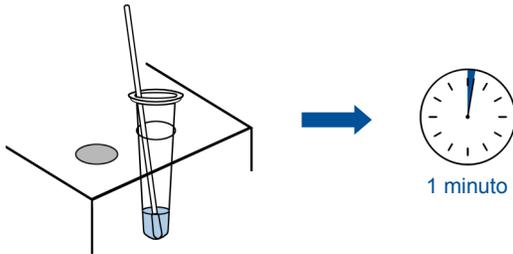

RETIRAR EL HISOPO DEL TUBO


Al cabo de 1 minuto, retire el tubo de la estación de trabajo.

Al sacar la torunda del tubo, **apriete la punta de la torunda varias veces desde el exterior del tubo.** Trate de liberar la mayor cantidad posible de líquido del hisopo. Deseche el hisopo en la basura.

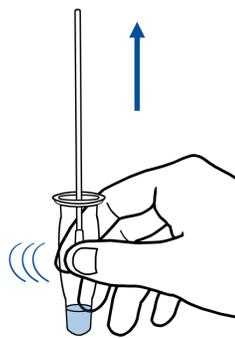

INSERTAR TAPA GOTERO


Introduzca la punta suministrada en el kit en el tubo. **Asegúrese de que quede bien ajustada.**

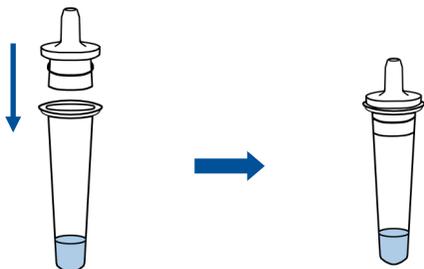

PASO 4

ABRIR EL DISPOSITIVO DE PRUEBA


Abra la bolsa del dispositivo de prueba rasgando la zona marcada con un círculo a continuación. **Coloque el dispositivo de prueba en una superficie plana.**

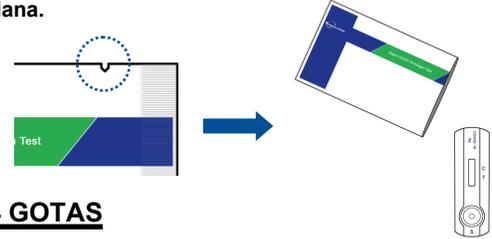

AÑADIR 4 GOTAS

Mantenga el tubo recto y apriete suavemente para añadir **4 gotas** de solución en el pozo de la muestra, etiquetado como "S" en el dispositivo de prueba.

Poner en marcha el temporizador durante 15 minutos.

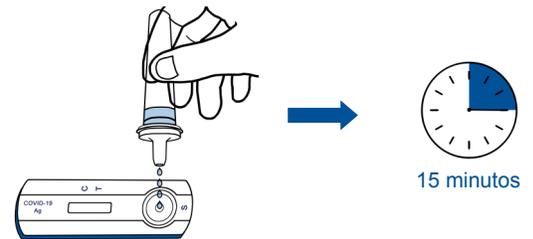


PASO 5

LEER EL RESULTADO DE LA PRUEBA

Después de 15 minutos encuentre la ventana de resultados, etiquetada como "C" y "T" en el dispositivo de prueba. **No leer el resultado después de 20 minutos.** A continuación encontrará ejemplos de resultados positivos, negativos e inválidos. Lea las instrucciones de uso para entender el significado de sus resultados.


COVID-19 POSITIVO

Si el dispositivo de prueba se parece a los ejemplos siguientes, entonces se ha encontrado una infección por COVID-19. Habrá dos líneas rosas/rojas en la parte superior e inferior. Fíjese bien en la línea inferior junto a la "T". **Esta línea puede ser muy tenue.** Cualquier línea rosa/roja visible aquí es un resultado positivo.

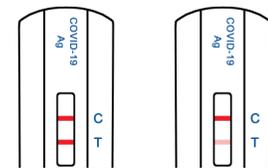

COVID-19 NEGATIVO

Si el dispositivo de prueba se parece al ejemplo siguiente, entonces no se ha encontrado la infección COVID-19. Sólo verá **una línea junto a "C"**.

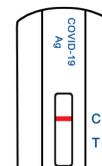

RESULTADO INVALIDO

Si el dispositivo de prueba se parece a los ejemplos siguientes, la prueba no puede dar un resultado y deberá repetir la prueba con. **No habrá ninguna línea junto a la "C"**.

